



تست سریع تشخیص هموگلوبین در نمونه مدفوع

سریع

- سهولت استفاده
- نتیجه در ۵ دقیقه

کارایی بالا *

- حساسیت: ۹۴/۶٪
- اختصاصیت: ۹۹/۳٪


* در مقایسه با دیگر تست‌های سریع تشخیصی. برای اطلاعات بیشتر به دستورالعمل‌های استفاده مراجعه کنید.

راحت

ماندگاری هر بسته کیت: ۲۴ ماه در دمای $2-3^{\circ}\text{C}$

سرطان کلورکتال یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها بوده و علت اصلی مرگ ناشی از سرطان است. تشخیص زودرس سرطان کلورکتال باعث بهبود بقا و در نتیجه مرگ و میر کمتر می‌شود. در افراد سالم، در صورت عدم وجود سرطان یا پاتولوژی شدید، مقدار کمی از خون در مدفوع قابل تشخیص است. به این نشت، نشت فیزیولوژیکی گفته می‌شود. آستانه تشخیصی تست سریع هموتراست، بالاتر از آستانه مربوط به نشت فیزیولوژیکی بوده و نشت فیزیولوژیکی را شناسایی نمی‌کند. نوع اولیه آزمایش FOB (خون مخفی مدفوع) که از نظر تجاری در دسترس است، از یک روش گایاک استفاده می‌کند که برای به حداقل رساندن نتایج منفی کاذب و مثبت کاذب، نیاز به رعایت محدودیت‌های غذایی خاصی داشت. هموتراست یک آزمایش ایمونوکروماتوگرافی سریع برای تشخیص کیفی هموگلوبین انسانی در نمونه‌های مدفوع بدون محدودیت در رژیم غذایی است.

روش تست**

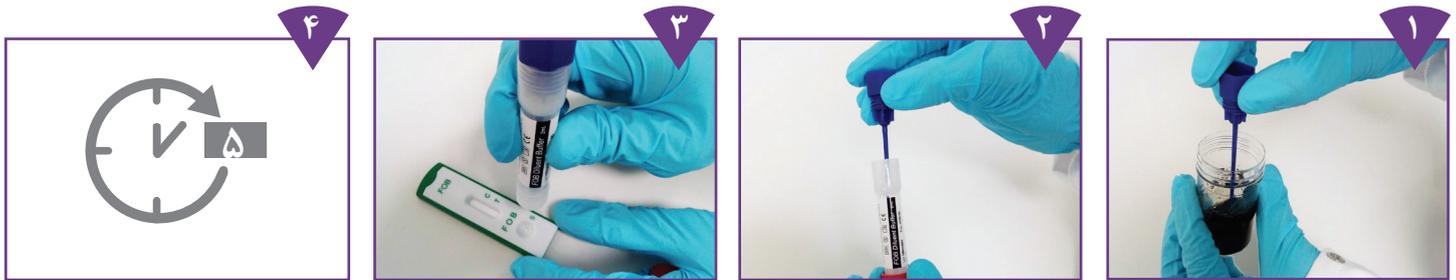

تست را بعد از ۵ دقیقه بخوانید.
بعد از ۱۰ دقیقه تفسیر نکنید.


با شدت مخلوط کنید. درپوش قرمز لوله بافر را باز کنید و ۲ قطره نمونه رقیق شده را به داخل چاهک نمونه (S) کاست منتقل کنید.

اپلیکاتور را مجدداً درون لوله بافر قرار دهید.


نمونه‌های مدفوع را با فروکردن اپلیکاتور در ۳ محل مختلف مدفوع جمع‌آوری کنید.

** روش ساده شده.
برای مراحل کامل به دستورالعمل‌های استفاده مراجعه کنید.

نتایج

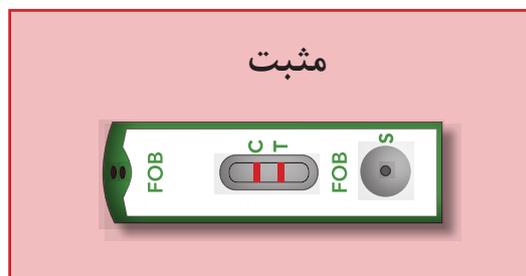

مثبت

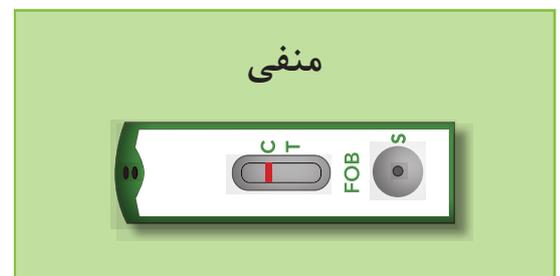

منفی

محتوای کیت

- ۲۵ کاست تست
- ۲۵ ویال بافر استخراج با قطره چکان
- دستورالعمل استفاده

کارایی*

هموتراست®	
حساسیت	۹۴/۶٪
اختصاصیت	۹۹/۳٪

* در مقایسه با دیگر تست‌های سریع تشخیصی.
برای اطلاعات بیشتر به دستورالعمل‌های استفاده مراجعه کنید.

Product references CE

- Ref. 1110002
- HEMOTRUST®
- 25 tests



شرکت تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
زیست آزما طب

تهران، شیخ بهایی شمالی، خیابان اوستا، خیابان ده ونک، نرسیده به میدان
شیخ بهایی، پلاک ۳، ساختمان سینا، طبقه ۵، واحد ۹
zistazmatebco.com
Info@zistazmatebco.com
Zistazmateb
۰۲۱-۸۸۶۱۸۴۸۰-۲
۰۹۹۲۹۷۸۸۵۷۰

