



URITOP®+ 11

نوار تست ادرار

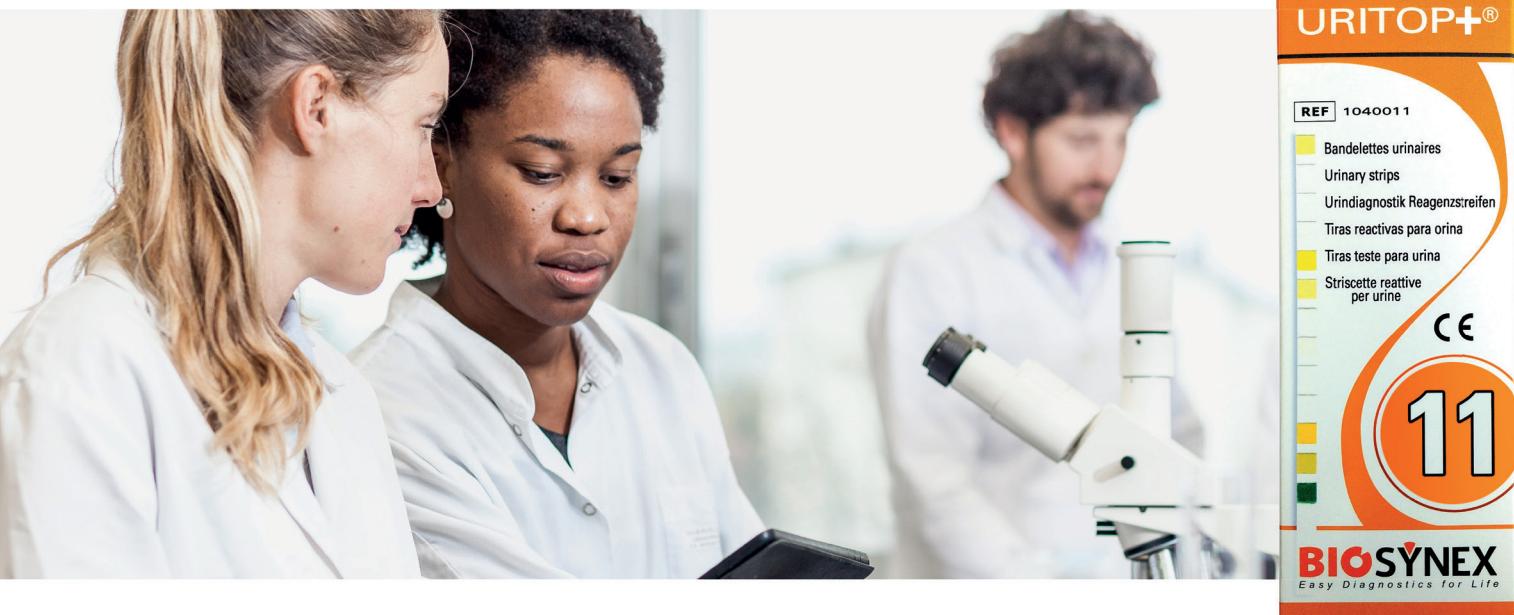

تست کلینیکی برای تشخیص ۱۱ پارامتر در نمونه‌های ادرار

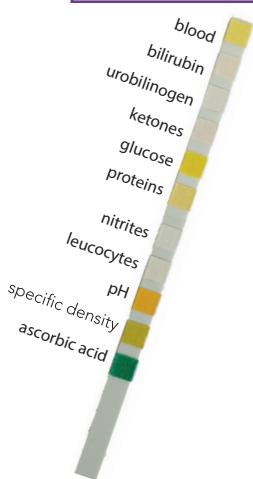

راحت و سریع

- هر بسته حاوی ۱۰۰ نوار تست همراه با گراف رنگی برای خوانش و مقایسه نتیجه تست
- نتیجه تست: در ۶۰ ثانیه

قابلیت ردیابی و کنترل کیفیت


- دارای کنترل‌های مثبت و منفی برای اعتبار سنجی

روش انجام تست

نتایج را بعد از ۶۰ ثانیه بخوانید* با مقایسه رنگ‌های بدست آمده در مناطق واکنشی نوار با راهنمای رنگی چاپ شده روی بطری نوارها.



نوار را به صورت افقی نگه دارید و لبه نوار را روی کاغذ جاذب قرار دهید تا ادرار اضافی گرفته شود.

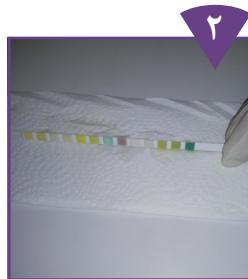

نوار را برای مدت (حداکثر) ۲ ثانیه در ادرار غوطه‌ور کنید. تمام مناطق واکنشی نوار را خیس کنید. نوار را بیرون بیاورید.



*به جز لکوسیت‌ها: ۹۰ - ۱۲۰ ثانیه.

References CE

- Ref. 1040003 to 1040011- URITOP®+ product range
100 test strips
- Ref. 6040001 - URITOP®+ Controls
1 positive control 12 mL
+1 positive control 12 mL



شرکت تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی زیست آرما طب

تهران، شیخ بهایی شمالی، خیابان اوستا، خیابان ده ونک، نرسیده به میدان

شیخ بهایی، پلاک ۳ ساختمان سیننا، طبقه ۵، واحد ۹

zistazmatebco.com

Info@zistazmatebco.com

Zistazmateb

۰۲۱-۸۸۶۱۸۴۰۰-۲

۰۹۹۲۹۷۸۸۵۷۰